

mediform

SPECIÁLNÍ
ZDRAVOTNICKÝ
MATERIÁL



COMFORSOFT

UZAVŘENÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM



NÁVOD NA POUŽITÍ

COMFORSOFT

UZAVŘENÝ ODSÁVACÍ KATÉTR

Upozornění:

1. Pozorně si prohlédněte obal před použitím. Nepoužívejte jestli je obal poškozený nebo otevřený.
2. Nelze znovu sterilizovat
3. Na jedno použití
4. Označte katétr etiketou dne zavedení pacienta, výměnu katétrů provádějte dle tohoto značení.
5. Zkontrolujte neporušenost ochranného rukávu katétru.
6. Odsávání provádějte podle doporučených postupů. Většina odsávacích cyklů by neměla být delší než 10-15 sekund a aktuální působení negativního tlaku by nemělo být delší než 5-8 sekund.
7. Používejte adekvátní hladinu podtlaku. Obvyklé doporučené hodnoty jsou mezi 100-120 mmHg.

Instrukce k použití:


1. Vyberte vhodnou velikost katétru.
2. Ujistěte se, že proplachový port je těsně uzavřen.
3. Napojte katétr schodkovitým konektorem na zdroj sání.
4. Stiskněte a podržte sací ventil a současně nastavte hladinu vakua na externím zdroji na požadovanou hodnotu.
5. Uvolněte sací ventil a připojte Comforsoft katétr mezi pacienta a ventilační okruh.
6. Během odsávání držte kolínko systému pevně jednou rukou a druhou rukou zaveďte (dle označené stupnice) do příslušné hloubky do dýchacích cest.
7. Stiskněte sací ventil a během odsávání pomalu vysunujte katétr zpět dokud se černá značka na katétru nedostane do původní pozice.
8. Připravte si stříkačku nebo láhev s vodou pro výplachy (fyziologickým roztokem). Otevřete proplachový port a nasuňte konus stříkačky nebo láhve.
9. Zkontrolujte, že špička katétru je správně umístěna uvnitř oddělovacího ventilu a ventil má svůj originální tvar. Neaplikujte roztok ze stříkačky nebo lahve tlakem na píst nebo láhev. Stiskněte a držte sací ventil, dokud všechna viditelná tekutina není odstraněna z katétru.
10. Pro opakované odsávání zopakujte kroky 6.-9. Nepoužívejte déle než 72 hodin nebo maximální dobu určenou vaším doporučeným postupem dle hygienického standardu vašeho pracoviště.

Volitelně : MDI – aerosolový port
LATEX FREE
DEHP FREE
Sterilizováno ETO (ethylenoxidem)

Uzavřený systém odsávání po dobu max. 72 hodin u ventilovaných pacientů

Výhody:

- odstranění sekretů z dýchacích cest s možností kontinuální ventilace
- zcela uzavřený systém - vysoký stupeň ochrany před rizikem infekce pacientů i personálu
- jednocestný ventil pro aplikaci výplachového roztoku
- odsávací katétr s cejchováním pro kontrolu hloubky zavedení

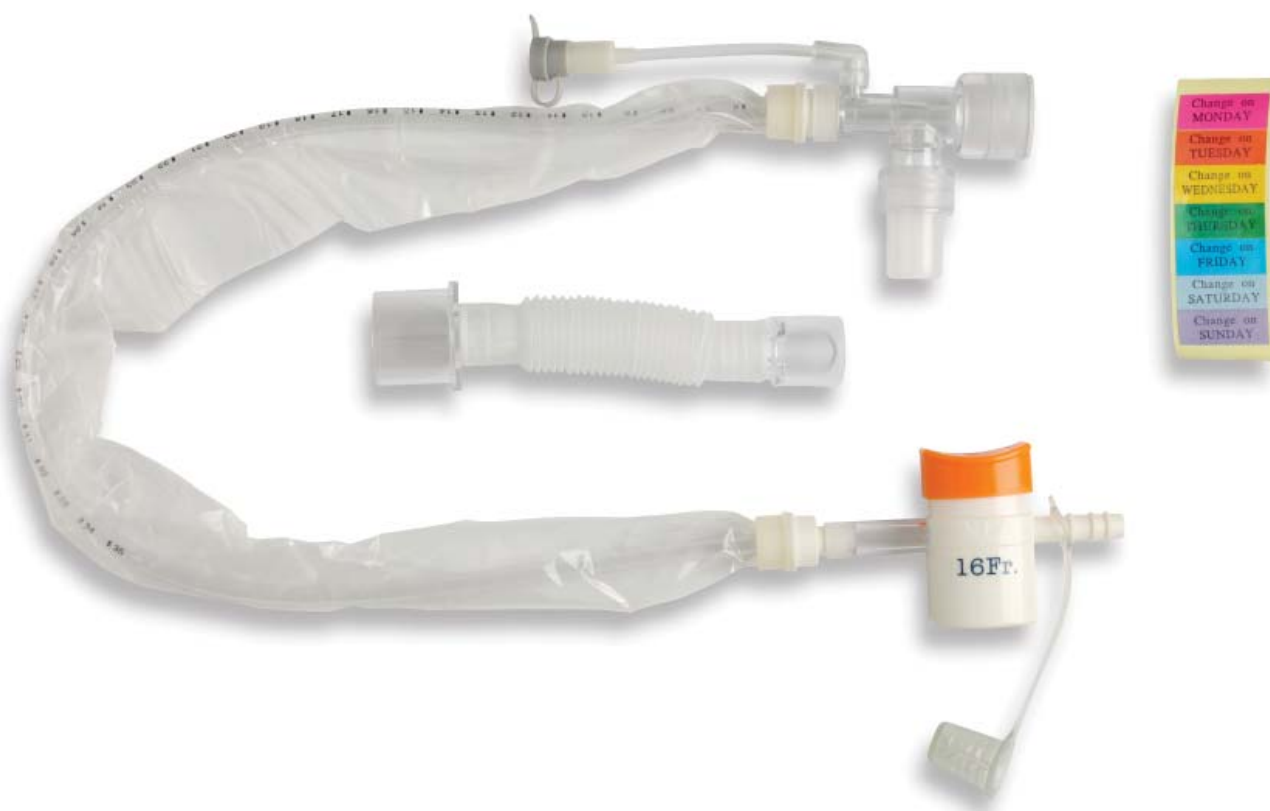

- Varianta pro dospělé / dětské pacienty všech váhových a věkových kategorií
- Délka katétru - tracheostomické kanyla a endotracheální kanyla
- S dvojitým otočným kloubem zajišťující pružnost a optimální úhel při otáčení
- Možnost proplachu systému fyziologickým nebo jiným roztokem
- Certifikace na dobu použití 72 hodin
- Speciální komora, která zajistí efektivnější čištění špičky katétru
- Hladký a volný pohyb odsávací cévky uvnitř ochranného rukávu
- Zvláštní vstup pro aerosolovou terapii – MDI port

Velikosti:	CH 6 - CH 16
Délky:	30 - 50 cm
Doba použití:	max.72 hodin
Lokalita:	tracheostomické endotracheální



COMFORSOFT

UZAVŘENÝ ODSÁVACÍ SYSTÉM DOBA POUŽITÍ 72 HODIN

katalogové číslo	model	balení
02-011-01	Uzavřený odsávací systém - CH 6, délka 30 cm	25 ks
02-011-02	Uzavřený odsávací systém - CH 8, délka 30 cm	25 ks
02-011-04	Uzavřený odsávací systém - CH 12, délka 30 cm	25 ks
02-011-05	Uzavřený odsávací systém - CH 14, délka 30 cm	25 ks
02-011-06	Uzavřený odsávací systém - CH 16, délka 30 cm	25 ks
02-011-07	Uzavřený odsávací systém - CH 6, délka 45 cm	25 ks
02-011-08	Uzavřený odsávací systém - CH 8, délka 45 cm	25 ks
02-011-10	Uzavřený odsávací systém - CH 12, délka 55 cm	25 ks
02-011-11	Uzavřený odsávací systém - CH 14, délka 55 cm	25 ks
02-011-12	Uzavřený odsávací systém - CH 16, délka 55 cm	25 ks
02-011-14	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 8, délka 30 cm	25 ks
02-011-15	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 10, délka 30 cm	25 ks
02-011-16	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 12, délka 30 cm	25 ks
02-011-17	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 14, délka 30 cm	25 ks
02-011-18	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 16, délka 30 cm	25 ks
02-011-21	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 10, délka 55 cm	25 ks
02-011-22	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 12, délka 55 cm	25 ks
02-011-23	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 14, délka 55 cm	25 ks
02-011-24	Uzavřený odsávací systém s aerosolovým portem - CH 16, délka 55 cm	25 ks

MEDIFORM spol. s r.o.

Olšová 1 • CZ 637 00 Brno

Telefon +420 541 221 392 • Fax +420 541 220 736

objednavky@mediform.cz • www.mediform.cz

2014/02