



ADHEZÍVNÍ HEMOSTATICKÁ NÁPLAST

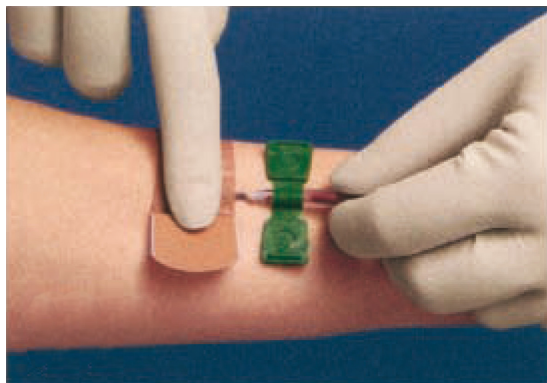

Sureseal™ LATEX FREE

- typ adhezivní náplasti bandáže k zastavení krváčení po vyjmutí jehly z punkčního místa
- vysoká účinnost hemostázy je dána vysokou nasákavostí speciální houbovitě celulózy a jejím nabobtnání při kontaktu s krví v punkčním místě
- LATEX FREE

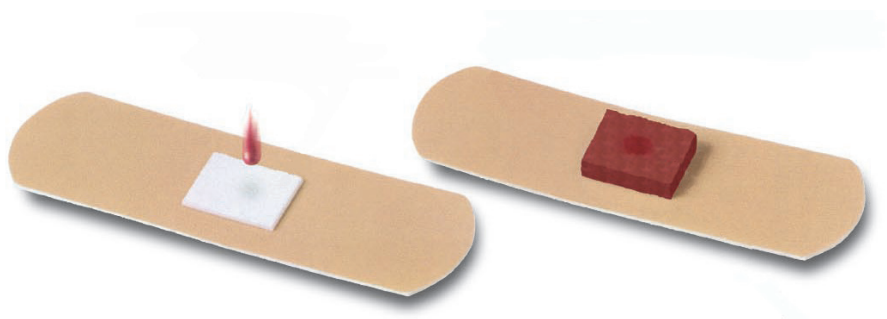

Použití:

1. Nejdříve odstraňte krycí papír z náplasti SURESEAL. Přiložte náplast tak aby se houba byla kontaktu s punkčním místem jehly. Nyní opatrně vytáhněte jehlu a následně přitiskněte náplast SURESEAL na pukční místo a fixujte adhezivní částí náplasti ke kůži.
2. V případech odstraňování dialyzační jehly z AV shuntu, stiskněte po přiložení SURESEAL punkční místo na doporučenou dobu po vytažení jehly rukou nebo obinadlem.

katalogové číslo	název	velikost		balení	
		náplast	houba	v boxu	boxů v kartonu
85101	SURESEAL L	25 x 72 mm	12 x 15 mm	100	2000
85201	SURESEAL XL	30 x 72 mm	15 x 20 mm	100	2000